
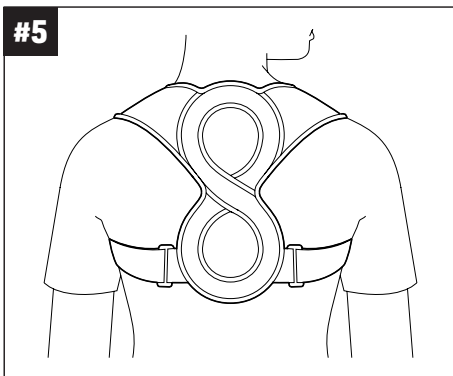
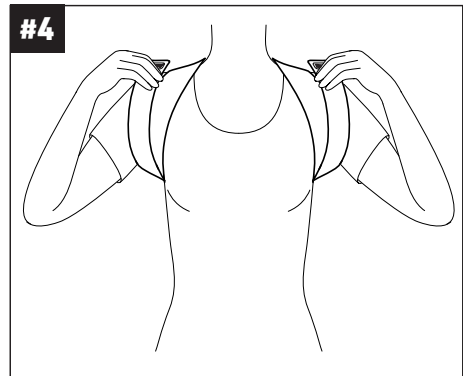
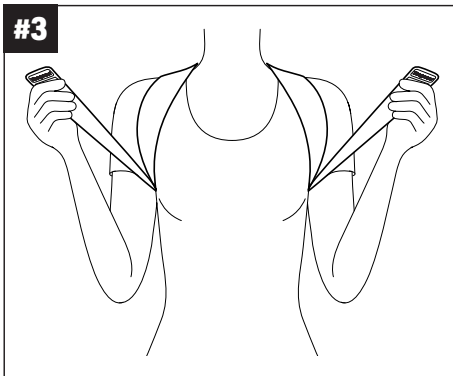
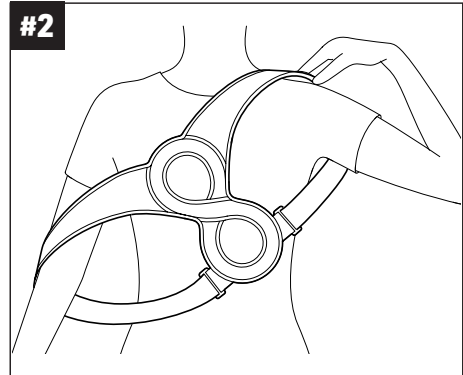


STRAIGHT 8™

Gebrauchsanleitung

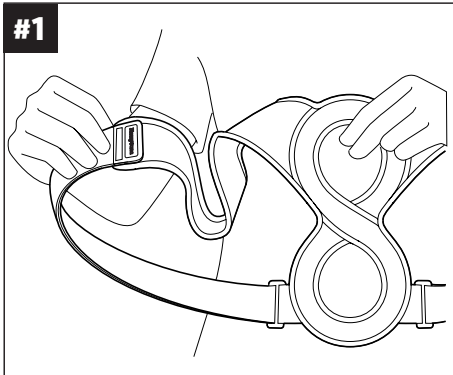

Lieferumfang:

1 x Straight 8™ Oberkörperstütze

1x Gebrauchsanweisung



AS SEEN ON
TV
ORIGINAL

WARNUNG:

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG

VORSICHT: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, der Allergien hervorrufen kann: Sollten Sie Hautreizungen bemerken, beenden Sie die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Sollten nach einmaligem Gebrauch Schmerzen oder Beschwerden auftreten, stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

1. Halten Sie Straight 8™ mit der Innenseite zu Ihnen und der grünen Ziffer „8“ nach außen (#1).
2. Ziehen Sie Straight 8™ wie einen Rucksack an, indem Sie Ihre Arme in den Riemen stecken (#2).
3. Öffnen Sie die Träger weit und ziehen Sie sie nach oben, bis sich Ihre Schultern zurückziehen (#3).
4. Sichern Sie die Gurte, indem Sie die losen Gurte auf die Gurte um Ihre Arme legen (#4).
5. Genießen Sie eine verbesserte Körperhaltung und Entlastung von Rücken- und Nackenverspannungen (#5).

NÜTZLICHE HINWEISE

Für zusätzlichen Komfort kann ein enganliegendes T-Shirt unter Straight 8™ getragen werden.

Dehnbare Gurte müssen möglicherweise gelegentlich angezogen werden, da sie sich durch Benutzung lockern können.

PFLEGEHINWEISE

Handwäsche mit kaltem Wasser. Nicht bleichen. Lufttrocknen. Nicht im Trockner trocknen. Kein Bügeln.

Nicht chemisch reinigen.



Materialzusammensetzung:

Äußere Schicht: 88% Polyamid, 12% Elasthan; **Mittlere Schicht:** 100% Polychloropren;

Innere Schicht: 70% Baumwolle, 30% Hanf; **Elastisches Band & Netz:** 100% Polyester

MADE IN CHINA



CH: MediaShop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland

EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 – kostenlose Servicehotline

ROW: +43 1 267 69 67

V35265 Stand: 01/2023